

Композитна зволожуюча смола (Composite Wetting Resin)

Опис:

Композитна зволожувальна смола 45%-й наповненості, рентгеноконтрастна зволожуюча смола, що затверджується полімеризацією.

Показання

Використовується в процесі розміщення шарів композиту, у разі сухості композиту при пошаровому внесення або був видалений або зруйнований інгібований киснем шар. Композитна зволожуюча смола допомагає поліпшити ковзання інструменту при процедурах моделювання та контуровання.

Методика застосування: Підготовка:

1. Перед використанням надіньте насадки на шприци та переконайтеся, що матеріал вільно проходить через насадку. При надмірному опорі замініть насадку і спробуйте ще раз. Використовуйте тільки рекомендовані Насадки. **Застосування:**

- 1) При нанесенні безпосередньо на композит, наносіть смолу НЕВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ.
- 2) При використанні смоли для ковзання інструменту, нанесіть НЕВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЬ на інструмент або поверхню неполімеризованого композиту.
- 3) Дотримуйтесь інструкцій виробника композитних матеріалів по полімеризації.

Запобіжні заходи та попередження

1. Будь-яка смола при контакти з м'якими тканинами може спричинити чутливість і викликати алергічну реакцію, якщо людина алергетик. Тому промийте ділянку шкіри, щоб видалити матеріал. Якщо спостерігається дерматит, висип або будь-яка інша алергічна реакція, зверніться до лікаря.
2. При дозуванні/нанесенні матеріалу, ніколи не натискайте зі всієї сили на плунжер шприца. Якщо є надлишковий тиск при натисканні на плунжер, замініть насадку новою і перевірити потік, перш ніж продовжувати. 3. Використовуйте лише насадки з кожним конкретним матеріалом. Насадки є одноразовими.
4. Для запобігання перехресному забрудненню ми рекомендуємо використовувати захисні пакети Ultradent® Syringe Covers, запечатані за допомогою Ultradent® Impulse Sealer.

Запобіжні заходи загального характеру:

1. Тільки для професійного застосування.
2. До початку лікування слід ознайомитися з інструкціями, запобіжними заходами та SDS. Строго дотримуйтесь вказівок.
3. Берегти препарати від високих температур і впливу сонячного світла.
4. Уникати контакту полімерів і композитів з шкірою.
5. Уникати попадання сильніючих хімічних речовин за межі області лікування.
6. Переконайтеся, що у пацієнта немає алергії на матеріали, що використовуються.
7. Перевірити рівномірність потоку матеріалу зі шприца і насадки поза ротової порожнини.
8. Ніколи не докладати надмірних зусиль до поршня шприца.
9. Використовуйте захисні пакети Ultradent® Syringe Coversta / або очистіть та дезінфікуйте шприци між пацієнтами. Якщо захисний чохол не використовується, шприц слід розглядати як одноразовий.
10. Використовуйте стандартні полімеризаційні лампи з усіма матеріалами, що полімеризуються / активуються світлом.

ПРИМІТКА. Дані про безпеку та додаткові відомості про використання наших засобів див. на веб-сайті www.ultradent.com.



UA.TR.137

Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive
(10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

[http:// www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)



www.ultradent.com

Ультрадрент Продакс Інк.
505 West Ultradent Drive,
(10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA

Маркування символи:

LOT Номер партії
Rx Тільки за призначенням
 Зберігати у холодильнику
 Беретти від сонячних променів
 Використати до
 Одноразового використання
 Підлягає переробці
 Подразник
 Дивись інструкцію перед використанням
REF Номер за каталогом

Вогнебезпечність

Здоров'я

Реактивність

Рівень загрози
4 = важкий
3 = серйозний
2 = помірний
1 = незначний
0 = мінімальний



Маркування продукції
J026 = номер партії
J026 = місяць
J026 = 2016 рік

Маркування систем відбілювання
символ пісочний годинник
10 = місяць
2016 = 2016 рік



UA.TR.137

Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive
(10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»
103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323
e-mail: info@stamil.ua http:// www.stamil.ua



Ультрадент Продакс Інк
505 West Ultradent Drive,
(10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США