

ЕДТА (EDTA) **18%-й хелатний агент**

Опис:

Ultradent EDTA є 18-відсотковий безбарвний водний хелатуючий розчин низької в'язкості. Матеріал застосовується для розширення і очищення корневих каналів.

1. Показання

Він допомагає підготувати кореневий канал, декальцинуючи дентин і видаляючи змазаний шар. EDTA рекомендується використовувати при механічній обробці каналу так і для остаточного промивання перед obturaцією каналу силером EndoREZ або будь-яким іншим.

Методика застосування:

Під'єднайте порожній шприц ємністю 1,2 або 5 мл до кінця великого шприца IndiSpense, щільно насадивши люерівський наконечник на шприці-дозаторі на зовнішнє різьблення шприца IndiSpense, як показано на мал. 1.

Натисніть долонею (мал. 2.) на поршень шприца IndiSpense, одночасно притримуючи шприц-дозатор вільною рукою. Злегка потягніть за поршень шприца-дозатора, щоб прискорити його наповнення. Забороняється видавлювати вміст шприца-дозатора назад у шприц IndiSpense. Для запобігання перехресному зараженню не слід знову приєднувати використаний шприц до шприца IndiSpense.


Зніміть люерівський наконечник зі шприца. Круговими рухами щільно насадіть голку-насадку NaviFX™ або NaviTip™ на шприц. Встановіть голку-насадку NaviFX за допомогою гумового упору так, щоб вона не доходила як мінімум 2 мм до кінця кореня зуба (див. мал. 3)

Мал.1

Мал.2

Мал.3

Мал.4

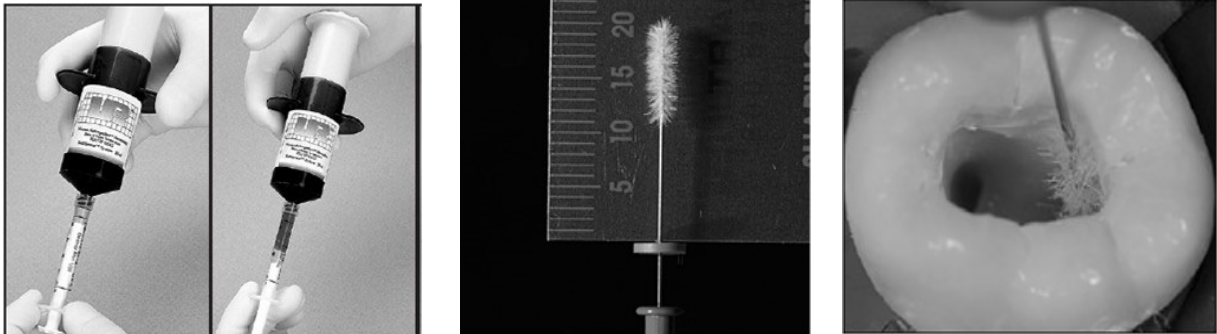

Мал.3 Встановлення насадки NaviFX на відстані 2 мм від верхівки кореня зуба і у вільному положенні в каналі.(Мал.3)

Мал.4 Введення EDTA в канал. Потріть кінчиком зі щіткою рухами вгору і вниз.

Ретельно ополосніть канал чистою стерильною водою, стерильним анестетиком або чистою EDTA не довше однієї хвилини.

Шприц-дозатор ємністю 1,2 мл обертаються рухами щільно накручується на шприц IndiSpense. Притримуючи плунжер шприца-дозатора вільною рукою, натисніть на плунжер шприца IndiSpense і наповніть шприц-дозатор до бажаного рівня(Мал.1-2)

Процедура

1. Переконайтеся, що голка NaviFX вільно рухається в каналі і не доходить як мінімум 2 мм до верхівки кореневого каналу. Повільно видавіть EDTA за допомогою голки-насадки NaviFX. Розподіліть розчин кінчиком зі щіткою, рухаючи ним вгору і вниз і очищаючи стінки кореня зуба EDTA, як показано на мал. 4. Чергуйте чищення гіпохлоритом натрію після кожного застосування файлу під час інструментальної обробки. Не видавлюйте EDTA, коли голка виставлена на повну довжину або впирається в стінки каналу.

2. Для досягнення найкращих результатів проведіть заключне ополіскування чистою, стерильною водою, місцевим анестетиком або чистою EDTA не довше однієї хвилини. Швидко і більш ефективно видалення основної частини розчину EDTA або інших ірригантів досягається за рахунок застосуванням вакуумного адаптера Luer з насадкою Capillary або насадкою Micro Capillary



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

<http://www.stamil.ua>

Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Інк.
505 Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США

довжиною 10 мм.

3. Для остаточного висушування каналів потрібні, як правило, один або два паперових штифта, якщо канали спочатку піддалися вакуумній обробці, як описано вище в пункті 2.

4. Підберіть майстер-штифт, потім проведіть obturaцію за допомогою силера EndoREZ™, гідрофільного силера та гутаперчі або використовуючи бажаний спосіб obturaції.

Запобіжні заходи та попередження

При ендодонтичній терапії завжди використовуйте хустинку з латексу (кофердам) для ізоляції оброблюваних зубів. Не допускайте проковтування розчину EDTA пацієнтами.

Не допускайте потрапляння розчину в очі і не залишайте його на м'яких тканинах протягом тривалого періоду часу.

Не висувайте насадку і не видавлюйте EDTA далі верхівки кореня зуба.

Не застосовуйте EDTA з канюлею біля верхівки кореня або якщо вона впирається у стінки каналу. Це може призвести до проникнення розчину далі верхівки кореня зуба.

Забороняється використовувати даний продукт для пацієнтів, чутливих до EDTA.

Насадки та шприци-дозатори підлягають утилізації і призначені для одноразового використання.

Загальні заходи безпеки:

Тільки для професійного застосування.

Перед використанням ознайомтеся з інструкцією, заходами безпеки та сертифікатом безпеки (MSDS). Використовуйте тільки згідно з вказівками.

Зберігайте в захищеному від тепла і сонячного світла місці.

Уникайте потрапляння на шкіру.

Ізолюйте ділянку лікування при використанні сильних хімікатів.









Перед застосуванням переконайтеся, що пацієнт не має алергії на компоненти препарату.


Перед застосуванням препарату перевірте поза порожниною рота, як він виходить із шприца.

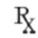Ніколи не застосовуйте силу при тиску на поршень шприца.

Використовуйте захисні чохла для шприців Ultradent® Syringe Covers та/або очищайте і дезінфікуйте шприци перед застосуванням.

Маркування символи:

-  Тільки для професійного застосування
-  Зберігати при кімнатній температурі
-  Використати до
-  Одноразового використання
-  Утилізація
-  Небезпечно для здоров'я
-  Дивись інструкцію перед використанням
-  Номер за каталогом

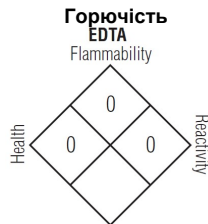

Маркування продукції

J026 = номер партії
J026 = місяць
J026 = 2016 рік

Маркування систем відбілювання

символ пісочний годинник
10 = місяць
2016 = 2016 рік

Здоров'я Реакційна здатність

ШКАЛА НЕБЕЗПЕКИ

4 = Критичний рівень

3 = Серйозний рівень

2 = Помірний рівень

1 = Незначний рівень

0 = Мінімальний рівень Номер партії



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

<http://www.stamil.ua>

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),

South Jordan,

Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Інс.

505 Вест Ультрадент Драйв

Саус Йордан,

Юта 84095, США

