

Enamelast

Фторемісний лак

Опис:

Фторуєчий лак Enamelast® – це ароматизований, підсолоджений ксилітом 5%-й фторид натрію в полімерному середовищі, який поставляється у шприці 1,2 мл або у блістерній упаковці з разовою дозою 0,4 мл.

Показання

Фторуєчий лак Enamelast® – це 5%-й фторид натрію в лаковому середовищі, який забезпечує механічну оклюзію дентинних каналців при лікуванні підвищеної чутливості зубів а також як профілактичний засіб проти карієсу

Методика застосування:

Нанесення за допомогою шприца.

1. Перед застосуванням ретельно почистіть зуби, пришліфуйте гумовими чашечками або протріть марлею\ватним валиком.
2. Зніміть люерівський ковпачок із шприца і надійно закріпіть на ньому наконечник SoftEZ® (продається окремо).
ПРИМІТКА. Enamelast можна також попередньо помістити на тильний бік одягнутої в рукавичку руки медпрацівника або у скляний стаканчик, а потім нанести за допомогою звичайної щітки (продається окремо).
3. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється із шприца.
4. Перевірте колір та консистенцію продукту перед нанесенням, видавивши невелику кількість на папір для змішування абомарлю. Утилізуйте будь-яку прозору рідину, яка з'явилася.
5. Злегка підсушіть ділянку, яку належить обробити.
6. Нанесіть тонкий гладкий шар на суху поверхню як можна більшої кількості зубів, ніби наносите фарбу.

Нанесення разової дози

1. Перед застосуванням ретельно прочистіть зуби, відшліфуйте гумовими чашечками або протріть марлею.
2. Відкрийте упаковку блістера, відігнувши і знявши покриття з фольги.
3. Злегка перемішайте лак одноразовою щіткою.
4. Злегка підсушіть ділянку, яку належить обробити.
5. Нанесіть тонкий гладкий шар лаку Enamelast® на суху поверхню як можна більшої кількості зубів, ніби наносите фарбу.

ПРИМІТКА.

Щітку можна згинати під кутом до 90 градусів для полегшення доступу.

ПРИМІТКА.

Enamelast затвердіває при контакт з водою або слиною. Забезпечте контакт щік, губ і слини з зубами або обережно обробіть зуби прохолодною водою. З естетичних міркувань попросіть пацієнтів не облизувати губи протягом декількох хвилин після нанесення засобу.

Пацієнтам не слід чистити зуби, використовувати зубну нитку, жувати тверду, липку або гарячу їжу протягом 4-6 годин після лікування. Фторуєчий лак Enamelast® буде поступово сходити при кожному чищенні зубів.

Запобіжні заходи та попередження

1. Уважно вивчіть усі інструкції перед використанням.
2. Не використовуйте більше половини шприца 1,2 мл з фторуєчим лаком на одного пацієнта на один раз.
3. Зберігайте за кімнатної температури.
4. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється із шприца. При надмірному опорі замініть насадку і повторіть перевірку. Використовуйте тільки рекомендовані насадки.
5. Не знімайте ковпачок із шприца або покриття з фольги з блістерної упаковки, поки не будете готові до використання.
6. Під час використання даного засобу пацієнт, медпрацівник та його асистент повинні носити захисні окуляри.
7. Не використовуйте для лікування пацієнтів із виразковим гінгівітом або стоматитом.



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»
103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323
e-mail: info@stamil.ua http:// www.stamil.ua

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA













www.ultradent.com


Ультрадент Продакс Інк.

505 West Ultradent Drive, (10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США

8. Не проводьте лікування за допомогою інших зовнішніх засобів для фторування зубів у той самий день і попередьте пацієнта про необхідність утримуватися від застосування фторвмісних засобів у ротовій порожнині протягом 4 (чотирьох) днів після лікування.
9. Не використовуйте засіб для лікування пацієнтів з відомою підвищеною чутливістю до інгредієнтів, у тому числі до каніфолі (kolophonium). При появі алергічної реакції, дерматиту або висипання зверніться до лікаря.
10. У рідкісних випадках повідомлялося про набряку припухлість після застосування фтор лаку на великій ділянці, а також про утруднення дихання у дітей, які страждають на астму.
11. Деякі пацієнти можуть відчувати нудоту після застосування засобу. Якщо нудота не минає, слід ретельно почистити зубидля видалення плівки лаку.
12. Наконечники шприца призначені виключно для одноразового використання для уникнення перехресного зараження.
13. Попередньо наповнені шприци можна використовувати декілька разів. Щоб уникнути перехресного забруднення, користуйтеся захисними ковпачками для шприців. Після застосування зніміть і утилізуйте захисний ковпачок і насадку шприца. Після використання надівайте на шприци люєрівські ковпачки і обробляйте їх дезінфікуючим засобом для пристроїв медичного призначення, який не фіксує білки.
14. Належним чином утилізуйте контейнери, щітки, насадки та порожні шприци.
15. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
16. Тільки для професійного застосування.ПРИМІТКА. Дані про безпеку та додаткові відомості про використання наших засобів див. на веб-сайті www.ultradent.com.

Маркування символи:

-  Тільки для професійного використання
-  Використати до
-  Разове використання
-  Утилізувати
-  Увага, дивись інструкцію перед використанням
-  Легкозаймиста речовина
-  Зберігати за кімнатної температури
-  Гостра токсичність (небезпечно)
-  Код партії
-  Номер за каталогом

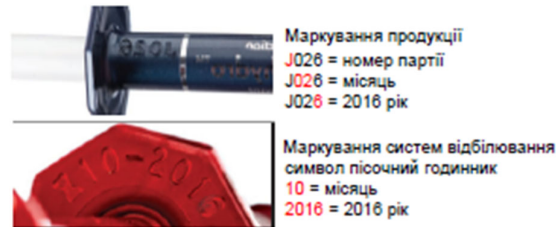

UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»
103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323
e-mail: info@stamil.ua http:// www.stamil.ua

Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Инк.
505 Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США

Дата останнього перегляду: 01.05.2026

