

Opalescence Goу 6% перекис водню, смак м'яти або дині Універсальні капи з відбілюючим гелем.

ОПИС ПРОДУКТУ

Opalescence Goу 6% перекис водню – це система відбілювання, яка береться додому, і постачається в попередньо завантажених одноразових універсальних капах.

Opalescence Goу 6% перекис водню - це прозорий, ароматизований, високов'язкий, липкий відбілюючий гель 6% перекису водню.

Форма(и) випуску

Opalescence Goу® 6% перекис водню попередньо наповнені, в'язким гелем 6%-ного перекису водню одноразові універсальні капи для верхньої та нижньої щелеп.

Склад

Гель для відбілювання Opalescence Goу складаються переважно з водного відбілювача, а також емульгаторів, підсолоджувача, ароматизаторів і наповнювачів.

Відбілюючий агент: перекис водню 6%

Інгредієнти: перекис водню, гліцерин, очищена вода, PVP, карбомер, калію гідроксид, діоксид кремнію, гідрофосфат калію, ксиліт, лимонна кислота, сахароза, фторид натрію, ЕДТА, лаурилсульфат натрію.

Ароматизатор: олія перцевої м'яти

Показання до застосування/призначення

Для відбілювання зубів за допомогою попередньо заповнених відбілюючим гелем універсальних кап

Попередження та запобіжні заходи

- Зберігайте виріб для відбілювання зубів у місцях, що є недоступними для маленьких дітей.
- Перед проведенням відбілювання рекомендується пройти огляд у стоматолога. У деяких випадках втрата зубами природного кольору може свідчити про необхідність проведення стоматологічного лікування, а не відбілювання. Порцелянові коронки, коронки з покривними фасетками та білі пломби не змінюють свій колір після відбілювання.
- Продукт призначений для використання тільки особами зі здоровими ясеневими тканинами. При використанні особами, що страждають на періодонтальні захворювання, можливим є подразнення ясеневих тканин.
- Продукт НЕ призначений для використання вночі.
- Люди деякі частини зубів можуть відбілюватися швидше або менш рівномірно ніж інші. Якість результатів, що досягаються, варіюється. Зуби приблизно 5% населення можуть не піддаватися відбілюванню. Відбілювання зубів з великими металевими пломбами може призвести до того, що металевий відтінок почне проступати крізь зуби.
- Вживання їжі/соків, що містять кислоту, відразу ж після відбілювання може спричинити чутливість зубів.
- Не використовуйте тютюнових продуктів і не вживайте їжу під час відбілювання.
- Не призначено для використання вагітними жінками. Якщо ви годуете дитину грудьми, перед використанням продукту проконсультуйтеся з медичним фахівцем.
- Зберігайте гель подалі від джерел теплового випромінювання / прямого сонячного світла. Не заморожуйте.
- Не проковтуйте гель або засоби для полоскання. Уникайте безпосереднього контакту активної поверхні продукту для відбілювання зубів з яснами та/або потоком слини. Продукт містить перекис; проковтування у великих кількостях може шкідливо вплинути на організм.
- Уникайте контакту зі слизовою оболонкою очей.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У деяких користувачів можуть розвинути чутливість зубів або подразнення ясен; зазвичай, вказані явища носять помірний характер і швидко проходять, але в деяких випадках може знадобитися лікування в стоматолога. Якщо ви відчуваєте істотний дискомфорт, припиніть використання даного продукту та зверніться за порадою до стоматолога. Якщо у вас виникли будь-які питання стосовно цього продукту або способів лікування, будь ласка, звертайтеся за порадою до стоматолога.

Продукт одноразового використання!!! Не використовуйте повторно.

Покрокові інструкції



КРОК 1 Зніміть фольгу, щоб відкрити верхню і нижню капи.



КРОК 2 Розмістіть верхню капу по центру зубної дуги і міцно прикусіть, потім Виконайте легке "всмоктування" протягом 2х секунд.



КРОК 3 Зніміть зовнішній лоток.

КРОК 4 Повторіть процес для нижнього лотка. Носіть капу Opalescence Goу упродовж 30 хвилин надень.

КРОК 5 Після закінчення процедури вийміть відбілюючу капу та почистіть зуби. Не ковтайте змитий гель.

Повторюйте один раз на день протягом 7 днів.

Зберігання та утилізація

Утилізуйте відходи згідно з місцевими нормами, інструкціями та правилами.

Інша інформація

Повідомте про будь-який серйозний інцидент виробнику та компетентному органу. www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200

Позначення

REF _Номер в каталозі

2 _Не використовувати повторно

TEMP _Обмежений температурний режим

LOT _Номер партії

TIME _Використати до

INFO _Дивись інформацію у супроводжуючих матеріалах

FACTORY _Виробник

SUN _Тримати подалі від сонячного світла

CHILD _Зберігати у недоступному для дітей місці

UP _Верхня капа

DOWN _Нижня капа

TOOTH _Зубна паста з відбілюючим ефектом

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

[http:// www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Інк.

505 Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США

Дата останнього перегляду: Лютий 2026