

Ultra-Blend® Plus

Прокладка, що затверджується світлом та містить гідроокис кальцію

Опис:

Ultra-Blend® plus рентгеноконтрасна прокладка що затверджується світлом. Ultra-Blend plus має адгезію до дентину і містить гідроксид кальцію і гідроксиапатит кальцію на основі уретандиметакрілата (УДМА). Завдяки високому ступеню наповнення матеріал Ultra-Blend plus має мінімальну усадку, а його висока в'язкість полегшує нанесення. Затвердженню матеріалу можна легко надати форму за допомогою високо- або низької наконечника бормащини. Матеріал випускається відтінку дентину і матово-білого відтінку.

Форма випуску: • шприц 1,2 мл

Показання

Матеріал UltraBlend plus є самоклеїним і використовується в якості прокладки під пломбу і (або) базового матеріалу перед нанесенням реставраційних матеріалів.

Методика застосування:

А. Загальні вказівки

1. Надійно закріпіть насадку Black Micro на шприці. Для великих препаруємих поверхонь використовуйте насадку BlackMini.

2. Підготуйте поверхню за допомогою якісної бондінгової системи відповідно до інструкцій виробника.

3. Нанесіть шар матеріалу Ultra-Blend plus товщиною 0,5-2 мм на необхідну область.

ПРИМІТКА. При нанесенні на важкодоступну область видавіть невелику кількість матеріалу, щоб на насадці утворилася кулька. За допомогою насадки нанесіть кульку на необхідну область щоб уникнути витискування зайвої кількості матеріалу.

4. Виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд при стандартній потужності за допомогою світлодіодної полімеризаційної лампи VALO® (для ламп потужністю <600 мВт/см² час затвердження становить 20 секунд, для ламп потужністю > 600 мВт/см² - 10 секунд).

ПРИМІТКА. Для створення бази спочатку нанесіть шар товщиною 0,5 мм і виконайте затвердження світлом. Товщина наступних шарів повинна становити 2 мм з затвердженням після нанесення кожного шару.

5. Матеріал Ultra-Blend plus буде зв'язуватися і з поверхнями, підготовленими за допомогою бондів, що забезпечують зчеплення з дентином, і з сухим дентином.

В. Прокладочний матеріал для зв'язування з дентином

1. Промийте відкритий дентин водою і висушіть повітрям.

2. Нанесіть якісну бондінгову систему відповідно до інструкцій виробника.

3. Нанесіть матеріал Ultra-Blend plus точно і в бажаному обсязі за допомогою насадки Black Micro.

4. Виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд при стандартній потужності за допомогою світлодіодної полімеризаційної лампи VALO® (для ламп потужністю <600 мВт/см² час затвердження становить 20 секунд, для ламп потужністю > 600 мВт/см² - 10 секунд).

С. Захисний базовий матеріал

1. Промийте відкритий дентин водою і висушіть повітрям.

2. Нанесіть якісну бондінгову систему відповідно до інструкцій виробника.

3. Використовуйте насадку Black Micro, якщо наносити потрібно на невелику ділянку, або Black Mini, якщо ділянка побільше.

4. Нанесіть матеріал Ultra-Blend plus і виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд при стандартній потужності за допомогою світлодіодної полімеризаційної лампи VALO® (для ламп потужністю <600 мВт/см² час затвердження становить 20 секунд, для ламп потужністю > 600 мВт/см² - 10 секунд).

5. Якщо остаточна базова прокладка повинна бути товщиною 2 мм, нанесіть перший шар товщиною 0,5 мм (або менше) і виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд. За необхідністю додавайте додаткові шари товщиною до 2 мм.

Примітка. Затвердження світлом для матеріалу Ultra-Blend plus може виконуватися до глибини 3 мм.

Д. прокладка на пульпу

ПРИМІТКА. Використовуйте матеріал Ultra-Blend plus при ураженні дентину (рожевого кольору) в безпосередній близькості до пульпи і невеликих механічних негіпермірованної оголеннях пульпи. При більших оголеннях і (або) гіперемії пульпи слід почати ендодонтичне лікування.

1. Нанесіть антибактеріальний розчин Consepsis за допомогою пластикової насадки Mini Dento-Infusor на 60 секунд акуратними втриаючими рухами. Не промивайте. Обережно висушіть повітрям.

2. Нанесіть матеріал Ultra-Blend plus за допомогою насадки Black Micro на сухий дентин по кордоні з оголеною пульпою, потім на саму оголену пульпу або на тонкий рожевий дентин в безпосередній близькості від пульпи.

ПРИМІТКА. Намагайтеся покрити мінімальну поверхню дентину, щоб збільшити доступну область для бондингу.

3. Виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд при стандартній потужності за допомогою світлодіодної полімеризаційної лампи VALO® (для ламп потужністю <600 мВт/см² час затвердження становить 20 секунд, для ламп потужністю > 600 мВт/см² - 10 секунд).

4. Нанесіть якісну бондінгову систему відповідно до інструкцій виробника та виконайте реставрацію за допомогою обраного засобу.

Е. опаковий матеріал

1. Надайте металу шорсткість за допомогою бору або процедури мікробразії.

2. Промийте водою і висушіть повітрям оголений метал, що підлягає закриттю.

3. Нанесіть якісну бондінгову систему відповідно до інструкцій виробника та виконайте затвердження світлом.

4. Поетапно нанесіть матеріал Ultra-Blend plus на метал, шарами не більше 2 мм. Виконайте затвердження світлом протягом 10 секунд при стандартній потужності за допомогою світлодіодної полімеризаційної лампи VALO® (для ламп потужністю <600 мВт/см² час затвердження становить 20 секунд, для ламп потужністю > 600 мВт/см² - 10 секунд).

5. Виконайте реставрацію за допомогою обраного композиту або іншого матеріалу.

Запобіжні заходи

1. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Через кілька годин роботи на наконечнику можуть накопичуватися хімічні речовини. Щоб уникнути забруднення знімайте насадку і надайте ковшачки на шприц коли не користуйтеся ним. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре матеріал видавлюється,

[Введіть текст]



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

[http:// www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Інк.

505 West Ultradent Drive, (10200 Cause),
Caucs Йордан,
Юта 84095, США

якщо погано проходить, замініть насадку і повторіть перевірку. Використовуйте тільки рекомендовані насадки.

2. Уважно прочитайте всі вказівки і дані про безпеку матеріалу перед використанням. Строго дотримуйтесь вказівок.

3. Під час затвердження матеріалу Ultra-Blend plus медпрацівник і пацієнт повинні використовувати засоби захисту очей від УФ-випромінювання.

4. Кількість продукту, що необхідна для використання протягом дня, зберігайте при кімнатній температурі. Головний запас слід зберігати в холодильнику.

5. Для зниження ступеня передчасної полімеризації композиту належить мінімізувати вплив яскравого світла під час процедури.

6. Композити можуть підвищувати чутливість. Уникайте частих контактів незатверджених стоматологічних композитів зі шкірою. Не використовуйте препарати для лікування пацієнтів з підвищеною чутливістю до акрилатів та інших композитів. При появі алергічної реакції, дерматиту або висипу зверніться до лікаря.

7. Належним чином утилізуйте використані насадки і порожні шприци.

8. Зберігайте в недоступному для дітей місці.

9. Щоб уникнути перехресного зараження не використовуйте насадки повторно.

10. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

11. Щоб уникнути перехресного зараження дезинфікуйте і протирайте шприц між застосуваннями дезинфікуючим засобом середньої активності та (або) використовуйте одноразові ковпачки для шприца. При використанні ковпачка для шприца зніміть насадку, надіньте на шприц новий ковпачок і викиньте насадку і старий ковпачок.

12. Зберігайте матеріал Ultra-Blend plus далеко від джерел тепла і прямих сонячних променів.

Маркування символи:

	Номер партії
	Тільки за призначенням
	Зберігати у холодильнику
	Їдке
	Використати до
	Одноразового використання
	Підлягає переробці
	Небезпечно для здоров'я
	Дивись інструкцію перед використанням
	Номер за каталогом

[Введіть текст]



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

[http:// www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



Ультрадент Продакс Інк.

505 Вест Ультрадент Драйв,
Саус Йордан,
Юта 84095, США

www.ultradent.com

