

УльтраКал XS (UltraCal XS)

Паста на основі гідроксиду кальцію

Опис:

Матеріал УльтраКал XS є рентгеноконтрастною пастою гідроксиду кальцію на водяній основі, з рівнем pH 12,5. Використовується як тимчасовий матеріал при проведенні ендодонтичних процедур. Відмінний контролю внесення УльтраКал XS, досягається при використанні насадки NaviTip™.

Показання

Паста УльтраКал XS використовується відповідно до стандартної процедури покриття пульпи, пульпотомії або в якості тимчасової пов'язки відповідно до процедур апексифікація в або тимчасового пломбувального матеріалу в ендодонтії.


Методика застосування:

Після інструментальної обробки видалить люерівський ковпачок зі шприца, що містить склад УльтраКал XS, і приєднайте насадку NaviTip. Вносіть матеріал УльтраКал XS від апексу, повільно виводьте насадку назад до устя кореневого каналу (Малюнок 1).

Примітка: Використовуйте матеріал Ультра Бленд Плюс як захисне покриття пульпи

Запобіжні заходи та попередження


1. Матеріал виявляє лужні властивості. Використовуйте обережно та змивайте великою кількістю води при випадковому потрапленні на небажані області.
2. Насадки є одноразовими.
3. Перед нанесенням продукту, шляхом видавлювання невеликої кількості на блокнот для змішування чи марлю переконайтеся у відповідності кольору продукту вимогам специфікації й у стабільності витoku продукту. Не використовуйте прозору рідину, що може виділятися в процесі видавлювання.
4. Розподіляйте продукт за допомогою насадки NaviTip, не доходючи, як мінімум, на 2 мм до апекса; стежте за тим, щоб насадка завжди вільно переміщалася всередині каналу. Не розподіляйте продукт із використанням пластмасових насадок (наприклад, насадок Carilla™), що можуть застрягти в каналі.
5. Попередньо наповнені шприци допускають багаторазове застосування. Перед використанням для лікування різних пацієнтів виконуйте відповідне очищення та дезінфікування.
6. Ми настійно рекомендуємо використовувати чохла для шприців Ultradent® Syringe Covers, що були герметизовані з використанням герметика Impulse Sealer, щоб забезпечити захисний бар'єр від перехресного забруднення.

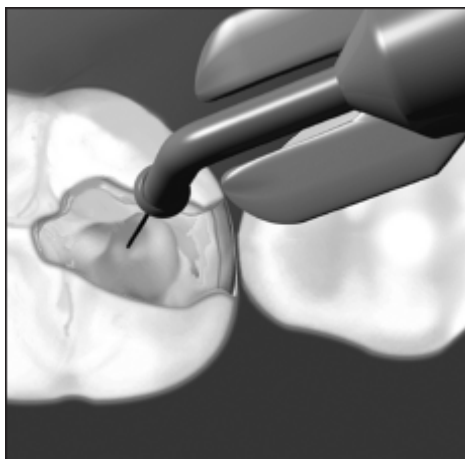

Малюнок 1 Після первинної інструментальної обробки канал заповнюється пастою УльтраКал XS.



Зберігати при кімнатній температурі

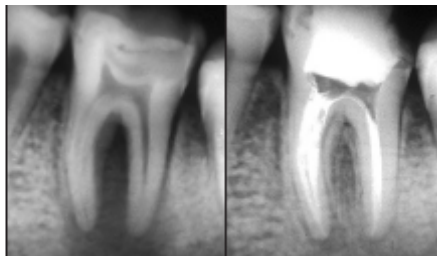

Після інструментальної обробки заповніть канал від апікальної частини кореня в напрямку назовні. Не доходить до апекса, як мінімум, на 2 мм.

Канал до обробки (ліворуч), та через 5 місяців після накладання УльтраКал XS (праворуч). Речовина УльтраКал XS все ще знаходиться в каналі.



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Стаміл», вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
тел/факс: +38044-22-707-55, e-mail: info@stamil.ua,
www.stamil.ua



Виробник: Ультрадент Продакс Інк. 505
Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),
Саус Йордан, Юта 84095, США

Загальні попередження:

1. Лише для професійного застосування.
2. Перед використанням уважно прочитайте всі вказівки, попередження та Паспорт безпеки речовини (матеріалу) і переконайтеся в тому, що ви розумієте наведену інформацію. Ознайомитися з Паспортом безпеки хімічної продукції та додатковою інформацією стосовно нашої продукції можна на нашому веб-сайті: www.ultradent.com
3. Зберігайте продукт у місцях, недоступних впливу джерел теплової енергії і прямих сонячних променів.
4. Уникайте потрапляння композитних смол на шкіру.
5. Обмежуйте дію сильнодіючих хімічних речовин місцем лікувального впливу.
6. Пересвідчіться, що пацієнт не має відомої алергії на матеріали, що використовуються в процесі лікування.
7. Перед використанням усередині ротової порожнини переконайтеся в безперешкодному витіканні матеріалу зі шприца та з насадки.
8. Ніколи не прикладайте надлишкових зусиль до поршнів шприців.
9. У проміжках між використанням для лікування різних пацієнтів використовуйте чохла Ultradent® Syringe Cover та/або виконуйте очищення та дезінфікування шприців.
10. При роботі з усіма матеріалами, що полімеризуються або активуються під впливом світла, використовуйте стандартні джерела затвердженого світла.


Знищити після використання

Відпускається лише зубним лікарям або за їхніми рецептами.

Не для ін'єкцій.

ПРИМІТКА. Дані про безпеку та додаткові відомості про використання наших засобів див. на веб-сайті www.ultradent.com.

Маркування символі:

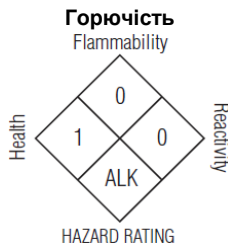

Маркування продукції
J026 = номер партії
J026 = місяць
J026 = 2016 рік

Маркування систем відбілювання
символ пісочний годинник
10 = місяць
2016 = 2016 рік

Здоров'я Реакційна здатність
ШКАЛА НЕБЕЗПЕКИ
4 = Критичний рівень
3 = Серйозний рівень
2 = Помірний рівень
1 = Незначний рівень
0 = Мінімальний рівень



Тільки за призначенням



Використати до



Одноразового використання



Утилізувати



Дивись інструкцію перед використанням



Номер за каталогом



номер партії



Дата останнього перегляду: Вересень 2021



Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Стаміл», вул. Бердичівська, 1
м. Київ, 04116, Україна
тел/факс: +38044-22-707-55, e-mail: info@stamil.ua,
www.stamil.ua



Виробник: Ультрадент Продакс Інк. 505
Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),
Саус Йордан, Юта 84095, США