

Ультра-Етч (Ultra-Etch®) 35%-на ортофосфорна кислота

Опис:

UltraEtch - це протравлюючий розчин 35% ортофосфорної кислоти оптимальної в'язкості. Його текучість забезпечує точний розподіл, в тому числі і в оклюзійних борознах, а достатня в'язкість дозволяє уникнути витікання. Розчин UltraEtch самостійно забезпечує обмежену глибину травлення (середня глибина становить 1,9 мкм за 20 секунд). Даний протравлюючий розчин без вмісту гліцерину розроблений для швидкого і повного видалення при промиванні.

Форма випуску: • шприц 1,2 мл
• шприц-диспенсер IndiSpense 30 мл

Термін зберігання: 48 місяців

Показання:

Застосовується для травлення зубної емалі та дентину перед нанесенням адгезивних речовин і установкою композитних пломб або зубних герметиків.

Вказівки щодо застосування

- Для шприца 1,2:
 - Зніміть люєрівській ковпачок.
 - Надійно закріпіть обрану робочу насадку (Blue Micro® або Inspiral Brush®).
 - Перед застосуванням протравлюючого розчину в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється з шприца.
 - Перед аплікацією перевірте колір і консистенцію матеріалу, видавивши невелику кількість на папір для замішування або марлю. Якщо видавити прозора рідина, приберіть її.
- Для шприца IndiSpense (рис. 1 і 2):
 - Зніміть люєрівській ковпачок з шприца IndiSpense.
 - Прикріпіть шприц 1,2мл до зовнішньої різьби шприца IndiSpense.
 - Натисніть на поршень шприца IndiSpense, щоб наповнити поршень шприца об'ємом 1,2 мл до необхідного рівня.
 - Від'єднайте шприц і знову надіньте на шприц IndiSpense люєрівській ковпачок.
 - Надійно закріпіть робочу насадку (Blue Micro або Inspiral Brush) до шприца об'ємом 1,2 мл.
- Вказівки по прямому нанесенню
 - Ізолюйте зуб (зуби).
 - На нешлифований емалі використовуйте пемзу, диск або алмазний бор.
 - Промийте і просушіть підготовлену ділянку.
 - Перед застосуванням протравлюючого розчину в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється з шприца.
 - Нанесіть протравлюючий розчин на емаль і дентин (на 20 секунд).
 - Ретельно промийте, просушіть і дотримуйтесь інструкцій виробника адгезиву.
- Очищення ортофосфорної кислотою при реставраційних процедурах



Мал. 1 і 2 Шприц-дозатор ємкістю 1,2 мл повертають рухам щільно накручується на шприц IndiSpense. Притримуючи плунжер шприца-дозатора вільною рукою, натисніть на плунжер шприца IndiSpense і наповніть шприц-дозатор до бажаного рівня.

- Нанесіть протравлюючий розчин на внутрішню сторону керамічного вініру або коронки на 5-10 секунд.
- Промийте і просушіть ділянку.

Запобіжні заходи та попередження:

- Уважно прочитайте і вивчіть всі інструкції перед використанням.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.
- У разі контакту продукту з будь-якими м'якими тканинами НЕГАЙНО промийте уражену ділянку великою кількістю води.
- Ділянку в безпосередній близькості до пульпи необхідно обробити захисним засобом, перш ніж застосовувати травильну речовину.
- Між використаннями закривайте, дезінфікуйте і протирайте шприц дезінфікуючим засобом проміжного рівня. При використанні захисного чохла для шприца зніміть насадку, надіньте на шприц ковпачок і викиньте захисний чохол.
- Утилізуйте наконечник і порожній шприц належним чином.
- Перевіряйте прохідність наконечників всіх шприців-пістолетів перед застосуванням в ротовій порожнині. При наявності опору, замініть наконечник і виконайте повторну перевірку. Використовуйте тільки рекомендовані наконечники. Щоб уникнути перехресного зараження не використовуйте насадки повторно.
- Зберігати при кімнатній температурі.
- Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

ПРИМІТКА. Дані про безпеку матеріалів і додаткові відомості про використання коштів Ultra-Etch см. На веб-сайті www.ultradent.com.

Маркування символи:

- LOT** Номер партії
- Rx** Тільки за призначенням
- 18°C - 25°C / 65°F - 77°F** Рекомендована температура зберігання
- ☞** Їдке
- ⌚** Використати до
- ⊘** Одноразового використання
- ⚠** Небезпечно для здоров'я
- 📖** Дивись інструкцію перед використанням
- REF** Номер за каталогом



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

http:// www.stamil.ua

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



Ультрадент Продакс Інк.

505 Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саут)
Саус Йордан,
Юта 84095, США

www.ultradent.com

