

## Універсальний герметик дентину (Universal Dentin Sealant)

### Опис:

Універсальний герметик дентину (Universal Dentin Sealant) – це біосумісний, який не полімеризується, високомолекулярний композит на етаноловій основі.

### Форма (-и) пакування

- Шприц об'ємом 1,2 мл

### Показання для застосування:

Універсальний герметик дентину герметично закриває оголені дентинні канали, захищаючи їх від агресивних подразнюючих композитів, кислот, цементів а реставраційних хімічних речовин. Дозволяється застосування як лаку для стандартної порожнини під амальгамовими пломбами. Рекомендується для полегшення післяопераційного вирівнювання поверхні коренів зуба і зменшення чутливості при знятті зубного каменю.

### Вказівки щодо застосування:

1. Зніміть люєрівський наконечник.
2. Надійно встановіть насадку-щіточку.
3. Ретельно ізолюйте і висушіть ділянку.
4. Перед кожним застосуванням засобу в ротовій порожнині перевіряйте, чи видавлюється Універсальний герметик дентину зі шприца.
5. Для чутливої поверхні коренів після зняття зубного каменю або для захисту поверхні кореня від агресивних хімічних речовин нанесіть тонкий шар Універсальний герметик дентину на підготовлену ділянку і обережно висушіть повітрям протягом 5-10 секунд.
6. Використовуючи як лак для порожнини під амальгамовими пломбами, нанесіть Універсальний герметик дентину на дно і стінки порожнини, уникаючи нанесення на порожнинно-поверховий край, потім висушіть повітрям протягом 5-10 секунд.

### Запобіжні заходи та попередження:

1. Перед використанням Універсальний герметик дентину уважно прочитайте і усвідомте всі інструкції.
2. Тільки для професійного застосування.
3. Чітко дотримуйтеся вказівок.
4. Зберігайте за кімнатної температури.
5. Композити можуть підвищувати чутливість. Переконайтеся, що пацієнт не має алергії на використовувані матеріали. Уникайте частих контактів неотверджених стоматологічних композитів зі шкірою. Не використовуйте препарати для лікування пацієнтів із підвищеною чутливістю до акрилатів та інших композитів. При появі алергічної реакції, дерматиту або висипання проконсультуйтеся з терапевтом.
6. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині завжди перевіряйте, наскільки добре він видавлюється. Якщо засіб не проходить, замініть насадку і повторіть перевірку.
7. Уникайте потрапляння сильнодіючих хімічних речовин за межі ділянки лікування.
8. Через декілька годин роботи на наконечнику можуть накопичуватися хімічні речовини. Щоб уникнути забруднення знімайте насадку і надівайте люєрівські ковпачки на шприц на час між використанням.
9. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

10. Між використаннями закривайте, дезінфікуйте і протирайте шприц-пістолет дезінфікуючим засобом проміжного рівня. При використанні одноразового захисного чохла для шприца зніміть насадку, надіньте на шприц ковпачок і викиньте захисний чохол.
11. Належним чином утилізуйте використані насадки і порожні шприци.
12. Насадки призначені тільки для одноразового використання. Щоб уникнути перехресного зараження не використовуйте насадки повторно.
13. Бережіть продукти від прямого впливу високих температур/сонячного світла.
14. Зберігайте в недоступному для дітей місці.

### Маркування символи



Номер партії



Зберігати при кімнатній температурі



Використати до



Одноразового використання



Дивись інструкцію перед використанням



Номер за каталогом



Займиста речовина

Дата спливу терміну придатності шприців Ultradent видрукувана на боковій поверхні шприца та складається з однієї літери та трьох чисел. Літера являє собою номер партії, що використовується в процесі виробництва, а три числа – дату спливу терміну придатності. Перші два числа вказують на місяць, а третє число є останньою цифрою року.



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: [info@stamil.ua](mailto:info@stamil.ua)

http:// [www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),  
South Jordan,  
Utah 84095, USA



Ультрадент Продакс Інк.

505 Вест Ультрадент Драйв, (10200 Саус),  
Саус Йордан,  
Юта 84095, США

[www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

