

ВіскоСтат прозорий (ViscoStat® Clear)

Гемостатик на основі 25%-ного хлорид алюмінію

Опис:

ВіскоСтат прозорий – це гель із 25%-ним вмістом хлорид алюмінію на в'язкій водній основі.

ВіскоСтат прозорий не залишає надлишків речовини і плям, що робить його ідеальним для застосування в естетичній зоні.

Показання

ВіскоСтат прозорий призначений для ретракції ясенної борозенки перед виготовленням зліпків, а також для контролю кровотечі і ясенної рідини в реставраційній та відновній стоматології, де він застосовується в поєднанні з ретракційною ниткою та/або насадкою Dento Infusor. Гелева форма забезпечує більш легке введення нитки в ясенну борозенку. **Методика застосування:**

1. Шприци об'ємом 1,2 мл

a. Зніміть люерівський ковпачок.

b. Надійно прикріпіть робочу насадку (Metal Dento-Infusor).

c. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється із шприца.

2. Шприц IndiSpense

a. Зніміть люерівський ковпачок із шприца IndiSpense.

b. Насадіть шприц об'ємом 1,2 мл на зовнішнє різьблення шприца IndiSpense.

c. Натисніть на поршень шприца IndiSpense, наповнюючи шприц об'ємом 1,2 мл до необхідного рівня.

d. Від'єднайте шприци і знову надіньте ковпачок на шприц IndiSpense.

e. Надійно прикріпіть робочу насадку (Metal Dento-Infusor).

f. Перед застосуванням засобу в ротовій порожнині перевірте, наскільки добре він видавлюється із шприца.

3. Обхопивши шприц долонею, повільно видавлюйте розчин і одночасно втирайте його в тканину, що кровоточить.

ПРИМІТКА. Щоб уникнути перехресного зараження використовуйте нові шприци та насадки, якщо потрібно взяти додатковий обсяг засобу.

ПРИМІТКА. Рекомендований час впливу гелю ВіскоСтат прозорий становить 1-3 хвилини.

Вказівки щодо застосування – зліпки

1. Виконайте кроки, описані вище в розділі «Загальні вказівки».

2. Для контролю кровотечі видавлюйте розчин на поверхню тканини, що кровоточить, і без зусиль втирайте його по всій поверхні ділянки, що препарується.

3. Після досягнення гемостазу очистіть ділянку, що препарується, сильним струменем повітря/води. Перевірте якість гемостазу. Якщо виникне кровотеча, повторіть описаний вище крок 2 для ділянки, що кровоточить. Проводьте повторну перевірку струменем повітря/води, поки не переконаєтеся, що кровотеча припинилася.

4. Для зміни форми і розташування тканини введіть нитку Ultrarak або нитку для зміни розташування ясенної тканини відповідного розміру в ясенну борозенку. Для оптимальної зміни форми і розташування ясенної тканини і гемостазу помістіть невелику кількість гелю ВіскоСтат прозорий у скляний стаканчик і просочіть ним нитку перед використанням.

5. Зачекайте 1-3 хвилини, перш ніж видаляти нитку.

6. Видаліть нитку, промийте сильним струменем повітря/води, перевірте якість гемостазу і зробіть зліпок. **Вказівки щодо застосування – реставрації з прямим і непрямим бондингом**

1. Виконайте кроки, описані вище в розділі «Загальні вказівки».

2. Для контролю кровотечі видавлюйте розчин на поверхню тканини, що кровоточить, і втирайте його по всій поверхні ділянки, що препарується.

3. Після досягнення гемостазу очистіть ділянку, що препарується, сильним струменем повітря/води. Перевірте якість гемостазу. Якщо виникне кровотеча, повторіть описаний вище крок 2 для ділянки, що кровоточить. Проводьте повторну перевірку струменем повітря/води, поки не переконаєтеся, що кровотеча припинилася.

4. Просочіть нитку Ultrarak або іншу нитку розчином ВіскоСтат прозорий.

5. Акратно введіть нитку відповідного розміру в ясенну борозенку.

6. Ретельно прочистіть ділянку, що препарується, і тканини, що її оточують, сильним струменем повітря/води і перевірте якість гемостазу та рівень контролю виділень з ясенної борозенки.



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»
103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323
e-mail: info@stamil.ua http:// www.stamil.ua

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Инк.

505 West Ultradent Drive, (10200 Саус),
Саус Йордан,
Юта 84095, США

7. Обробіть ділянку, що препарується, пемзою або абразивним скрабом Концепсис скраб компанії Ultradent.
8. Зачекайте 1-3 хвилини і видаліть нитку. У разі використання не просоченої нитки для зміни форми і розташування тканин під час реставраційної процедури нитку можна видалити або залишити на місці, щоб захистити м'які тканини.
9. Знову промийте сильним струменем повітря/води і висушіть.
10. Нанесіть бонд і реставраційний матеріал відповідно до вказівок виробника.

ПРИМІТКА ЩОДО ОЧИЩЕННЯ. Щоб уникнути забруднення дентину та/або субстрату емалі слід ретельно очищати зуб і прилеглі до нього тканини, а також видалити всі залишки кровоспинного засобу та коагуляти. Інакше це негативно позначиться на фіксації та бондингу, що призведе до появи мікропідтікання. Тимчасові цементи також можуть забруднювати поверхню, що призведе до появи мікропідтікання та порушення бондингу. **Запобіжні заходи та попередження**

1. Тільки для професійного застосування.
2. Перед використанням засобів уважно ознайомтеся з усіма інструкціями, запобіжними засобами та попередженнями.
3. Не використовуйте препарати для лікування пацієнтів з відомою алергією на хлорид алюмінію або з підвищеною чутливістю до хімічних речовин.
4. ВіскоСтат прозорий, тимчасові цементи, муцини та кров перешкоджають якійсь адгезії та полімеризації/отвердінню композитних смол, що призводить до мікропідтікання при будь-якій реставрації. Підготовлену ділянку слід ретельно очистити за допомогою сильного струменя повітря/води, пемзи або антисептичного скрабу Концепсис Scrub.
5. ВіскоСтат прозорий необхідно ретельно змити з підготовленої ділянки сильним струменем води/повітря, щоб не допустити реакції з поліефірними матеріалами.
6. При використанні самопротравлюючих засобів поверхню зуба/ділянки, що препарується, необхідно зачистити за допомогою пемзи або скрабу Концепсис і ретельно промити перед їх нанесенням. У цьому немає необхідності при використанні системи бондингу з протравленням за допомогою ортофосфорної кислоти або при використанні звичайного склоіономерного, цинкфосфатного або аналогічних цементів.
7. Не використовуйте в поєднанні з іншими кровоспинними засобами або хімічними поєднаннями, попередньо ретельно не очистивши зуб і прилеглі до нього тканини.
8. ВіскоСтат прозорий призначений для використання в ротовій порожнині.
9. Перед кожним застосуванням засобу в ротовій порожнині перевіряйте, чи видавлюється він із шприца. При надмірному опорі замініть насадку і повторіть перевірку.
10. Використовуйте тільки рекомендовані насадки.
11. Належним чином утилізуйте використані насадки і порожні шприци.
12. Щоб уникнути перехресного зараження не використовуйте насадки повторно.
13. Не використовуйте після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
14. Всі насадки шприців і порожні шприци підлягають утилізації та призначені для одноразового використання; утилізуйте їх, щоб уникнути перехресного зараження. У новий порожній шприц слід набирати кількість матеріалу, необхідну тільки для одного пацієнта. Після використання шприци підлягають утилізації.
15. Попередньо наповнені шприци можна використовувати декілька разів. Під час їх застосування необхідно використовувати захисні чохла. Після застосування зніміть і утилізуйте захисний чохол і насадку шприца. Після використання надівайте на шприци люєрівські ковпачки та обробляйте їх дезінфікуючим засобом для пристроїв медичного призначення, без фіксації білка.
16. Не допускайте проковтування препаратів.
17. Не піддавайте матеріали прямому впливу високих температур/сонячних променів.
18. При завантаженні ВіскоСтат прозорий роботі з ним одягайте захисний одяг і захисний екран для очей.
19. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
20. ВіскоСтат прозорий не містить епінефрину.

ПРИМІТКА. Дані про безпеку та додаткові відомості про використання наших засобів див. на веб-сайті www.ultradent.com.



UA.TR.137

Уповноважений представник в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»

103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.

Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323

e-mail: info@stamil.ua

[http:// www.stamil.ua](http://www.stamil.ua)

Ultradent Products Inc.

505 West Ultradent Drive (10200 South),

South Jordan,

Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Ультрадент Продакс Инк.

505 West Ultradent Drive, (10200 South),

South Jordan,

Utah 84095, USA

Маркування символи:



Номер партії



Тільки за призначенням



Зберігати за кімнатної температури



Їдке



Використати до



Одноразового використання



Підлягає переробці



Небезпечно для здоров'я



Дивись інструкцію перед використанням



Номер за каталогом



Маркування продукції
J026 = номер партії
J026 = місяць
J026 = 2016 рік



Маркування систем відбілювання
символ пісочний годинник
10 = місяць
2016 = 2016 рік



UA.TR.137

Ultradent Products Inc.
505 West Ultradent Drive (10200 South),
South Jordan,
Utah 84095, USA



www.ultradent.com

Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаміл»
103, корп.А, вул. Січових Стрільців, Київ, 04050, Україна.
Тел./факс 095-33-77-353, 067-33-77-323
e-mail: info@stamil.ua http:// www.stamil.ua



Ультрадент Продакс Інк.
505 West Ultradent Drive, (10200 South),
Саус Йордан,
Юта 84095, США