



КАЛЬЦІКУР (Calcicur)

Інструкція із застосування



Склад:

Паста з гідроксидом кальцію на водній основі, рентгеноконтрастна.

Область застосування:

- Непряме покриття при лікуванні глибокого карієсу
- Пряме покриття при розкритті пульпи або пульпотомії
- Покриття порожнин для захисту від кислотної дії при протравлюванні
- Для тимчасового пломбування каналів несформованих коренів зубів

Дозування і спосіб застосування:

Після очистки і висушування порожнини пасту **Кальцікур** наносити тонкими шарами до отримання потрібної товщини. Кожен шар залишати для короткочасного просушування або ретельно просушувати струменем повітря. Не наносити пасту на краї порожнини. На завершення нанести прокладку і пломбу.

При пломбуванні каналу кореня після його підготовки і очистки (перекис водню 3% і розчин гіпохлориту натрію) пасту внести відповідним для цього інструментом (лентуло). Уникати надмірного виведення матеріалу і потрапляння у нього повітря. Провести рентгенологічний контроль пломбування каналу кореня зуба. Оновити кореневу пломбу через тривалий час (через 6 - 8 місяців).

Додаткові вказівки/запобіжні заходи:

У випадку неналежного зберігання паста може висохнути або розділитися на фракції.

Якщо паста в захисній капсулі затверділа, то її властивості можна відновити, додаючи 1 - 2 краплі дистильованої води.

Гідроокис кальцію виявляє припікаючу дію на шкіру і слизову оболонку, уникайте потрапляння в очі. Поверхні твердих тканин зуба, що зв'язуються зі стоматологічними матеріалами, не можна покривати гідроокисом кальцію!

Не накладати **Кальцікур** товстими шарами, не застосовувати при залишковому каріозному дентині або в якості постійного пломбувального або фіксуючого матеріалів.

Зберігання:

Ємність після дозування пасти негайно закрити захисною капсулою. Після прямої аплікації канюлю необхідно очистити і стерилізувати.

Отверділу пасту надалі не використовувати. Не зберігати пасту при температурі нижче + 8°C!

Не застосовувати препарат **Кальцікур** після закінчення терміну придатності.

Форма випуску:

шприц для нанесення з 2 мл пасти Арт.-№ 1093

Наші препарати розроблені для застосування у стоматології. Усні та/або письмові вказівки, а також наші поради, засновані на докладному вивченні матеріалу, не зобов'язують Вас відмовитися від використання матеріалів, що випускаються нами, відповідно до Вашої спеціальності і на Ваш розсуд. Однак застосування наших матеріалів без нашого контролю знаходиться виключно у сфері Вашої власної відповідальності. Звичайно ми гарантуємо відповідність якості наших матеріалів чинним нормам, доставку та умови торгівлі - прийнятим стандартам.



Воко ГмБХ

27472 Антон-
Флеттнер-ст. 1-3,
Куксхафен, Німеччина

Voco GmbH

27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,
Cuxhaven, Germany

Уповноважений представник в Україні:

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович
02141 м. Київ, Україна,
вул. Мишуги ¼, кв. 19
m.litvinenko@voco.com
+380503311092



UA.TR.120