



## КЛІП/КЛІП Ф (Clip/ Clip F)

### Інструкція із застосування



**Кліп** – текучий матеріал світлового твердіння для тимчасових пломб, герметизації та інших лікувальних цілей. Завдяки його еластичній консистенції гарантується легке усунення пломби навіть за наявності піднутрень, завдяки чому немає потреби додаткової обробки порожнини.

**Кліп** постачається у шприцах-дозаторах і в капсулах для безпосередньої аплікації в порожнину. **Кліп Ф** - фторвмісний матеріал, що постійно вивільняє іони фтору.

#### Область застосування:

Тимчасові пломби будь-якого виду. Тимчасова ізоляція при встановленні вкладок і накладок.

#### Спосіб застосування:

Провести як звичайно препарування порожнини, нанести прокладку та зняти відбиток. Порожнину промити і висушити.

#### Кліп у шприцах-дозаторах:

Внести **Кліп** у порожнину відповідним інструментом (круглим штопфером, шпателем тощо).

#### Кліп у капсулах:

Вставити капсулу в отвір пістолета-дозатора (**Капс Аплікатор**), легко натиснути до моменту клацання і підтягнути допереду. Повернути капсулу у необхідному напрямку і зняти захисний ковпачок. Аплікувати **Кліп** у порожнину, тривало і рівномірно натискаючи на важіль пістолета-дозатора.

#### Подальша обробка:

Провести моделювання з незначним надлишком матеріалу. Перед полімеризацією, застосовуючи техніку виготовлення вкладок і накладок, ізолювати контактні ділянки від композиту за допомогою зубної нитки або матриці (збереження стабільності зубів).

Протягом 20-40 с (залежно від товщини шару) провести полімеризацію світлом галогенової лампи (напр., **Полофіл Люкс**). Шар товщиною 5 мм зазвичай твердне через 40 с. Якщо джерело світла не можна розмістити достатньо близько до матеріалу, то час полімеризації необхідно продовжити. Перевірити оклюзію. Надлишок матеріалу можна зрізати скальпелем. Для шліфування застосовувати силіконові фініри.

#### Усунення тимчасової пломби:

Для усунення відповідний інструмент (напр., зонд, кюретку) вставити збоку у тимчасову пломбу та витягнути її.

#### Вказівки/запобіжні заходи:

На поверхні композиту або прокладки (напр., з матеріалу світлового твердіння) може виникнути зчеплення. У цьому випадку застосувати відповідну ізоляцію (напр., гліцерин, вазелін). Уникати застосування евгенолвмісних прокладних матеріалів, оскільки це може негативно вплинути на твердіння. При тривалій ізоляції понад два тижні та при пломбуванні оклюзійної або крайової ділянок обов'язковим є зміцнення композитом (напр., **Арабеск**). Для цього незначну кількість композиту нанести на потрібні місця і провести полімеризацію по контуру з використанням матеріалу **Кліп**. Незначне розширення забезпечує щільне крайове прилягання на період

тимчасової ізоляції. Для збереження стабільності зубів і контактних пунктів перед полімеризацією усунути надлишки з міжзубного проміжку при одночасній ізоляції суміжних зубів.

**Кліп** містить метакрилати, акрилат-ефір, двоокис кремнію та полімери. **Кліп Ф** містить метакрилати, двоокис кремнію, полімери та фтор.

Не виключений прояв алергічних реакцій на ці інгредієнти. У пацієнтів з підвищеною чутливістю уникати контакту неотверділої пасти зі слизовою оболонкою.

Не застосовувати матеріал після завершення терміну придатності.

#### **Зберігання:**

Зберігати у захищеному від світла місці при температурі 4°C - 23°C. При тривалому невикористанні краще зберігати у холодному місці.

#### **Форма випуску:**

##### **Кліп**

Упаковка 2 x 4 г шприци Арт. № 1284

Упаковка «Трипак», 3 x 4 г шприци Арт. № 1285

Упаковка 25 x 0,25 г капсули Арт. № 1287

**Капс-аплікатор** Арт. № 1379

##### **Кліп Ф, з фтором**

Упаковка 2 x 4 г шприци Арт. № 1289

Упаковка «Трипак», 3 x 4 г шприци Арт. № 1283

Наші препарати розроблені для застосування у стоматології. Усні та/або письмові вказівки, а також наші поради, засновані на докладному вивченні матеріалу, не зобов'язують Вас відмовитися від використання матеріалів, що випускаються нами, відповідно до Вашої спеціальності і на Ваш розсуд. Однак застосування наших матеріалів без нашого контролю знаходиться виключно у сфері Вашої власної відповідальності. Звичайно ми гарантуємо відповідність якості наших матеріалів чинним нормам, доставку та умови торгівлі - прийнятим стандартам.



**Воко ГмбХ**

27472 Антон-  
Флеттнер-ст. 1-3,  
Куксхафен, Німеччина

**Voco GmbH**

27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,  
Cuxhaven, Germany

**Уповноважений представник в Україні:**

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович

02141 м. Київ, Україна,

вул. Мишуги ¼, кв. 19

[m.litvinenko@voco.com](mailto:m.litvinenko@voco.com)

+380503311092



**UA.TR.120**