



## Кліп Флоу

(Clip Flow)

### Інструкція із застосування



#### Опис матеріалу:

**Кліп Флоу** – це текучий матеріал світлового твердіння для тимчасових пломб, герметизації та ортопедичних конструкцій. Завдяки його еластичній консистенції гарантується легке усунення пломби з порожнини навіть за наявності піднурень, і тому немає потреби додаткової обробки порожнини.

#### Пок азання до застосування:

- 1) Тимчасові пломби та накладки
- 2) Закриття отворів гвинтів імплантатів
- 3) Прокладний матеріал для тимчасових коронок і мостоподібних конструкцій
- 4) Матеріал для блокування піднурень у зубній дузі, напр., перед зняттям відбитка
- 5) Ясенна маска
- 6) Фіксація пластмасових матриць при внесенні пломбувального матеріалу
- 7) Тимчасове пломбування порожнин і закриття входів кореневих каналів

#### Протипоказання :

**Кліп Флоу** містить метакрілати та ВНТ. Необхідно відмовитися від використання **Кліп Флоу**, при наявності гіперчутливості (алергії) до даного компоненту.

#### Цільова група пацієнтів :

**Кліп Флоу** дозволений до застосування у всіх пацієнтів без різниці в статі і віку.

#### Характеристики матеріалу :

Характеристики матеріалу відповідають вимогам, що пред'являються до виробів даного цільового призначення, а також стандартів, що поширюються на цей продукт.

#### Користувач :

**Кліп Флоу** повинен використовуватися професійно підготовленим спеціалістом в області стоматології.

#### Підготовка:

При потребі провести препарування, нанести прокладку та зняти відбиток. Ймовірність виникнення зчеплення при застосуванні стоматологічних пластмас або прокладок на основі метакрилату. У цьому випадку застосувати відповідну ізоляцію (напр., гліцерин, вазелін). Уникати застосування евгенолвмісних прокладних матеріалів, які можуть негативно вплинути на процес твердіння. Перед нанесенням **Кліп Флоу** порожнину сполоснути та висушити.

#### Застосування:

Нанести **Кліп Флоу** безпосередньо із NDT®-шприца із встановленою відповідною канюлею (тип 46). Для забезпечення належної функції NDT®-шприца поршень не відтягувати назад під час або після завершення аплікації.

При потребі розподілити **Кліп Флоу** на стінках порожнини інструментом (напр., зондом).

Полімеризацію проводити фотополімеризаційною лампою (мін. 500 мВт/см<sup>2</sup>) наступним чином:

при товщині шару до 1 мм - 10 с (напр., при використанні як ясенної маски), до 5 мм - 20 с та при товщині від >5 мм - 40 с. Торець світловода лампи тримати максимально близько до полімеризованого матеріалу, у противному разі це може негативно позначитись на процесі твердіння.

#### Фінішна обробка:

Надлишок матеріалу можна зрізати скальпелем або усунути кулеподібним бором. Для обробки підходять силіконові гумові фініри.

### **Усунення тимчасової пломби:**

Відповідний інструмент (напр., зонд або кюретку) ввести збоку у тимчасову пломбу та витягнути **Кліп Флоу** з порожнини.

### **Вказівки/запобіжні заходи:**

- **Кліп Флоу** містить метакрилати та ВНТ. За наявності підвищеної чутливості (алергії) до цих компонентів **Кліп Флоу** слід відмовитись від його застосування.
  - При потрапленні матеріалу в очі промити їх достатньою кількістю води та звернутись до лікаря.
  - Аплікаційні канюлі, що входять у набір, є одноразовими і після використання підлягають утилізації.
- Після завершення роботи з матеріалом знову надіти на шприц захисний ковпачок.  
-Фенольні субстанції, зокрема евгенол- та тимолвмісні препарати спричиняють порушення твердіння **Кліп Флоу**. Тому слід уникати використання цинкоксид-евгенольних або інших евгенолвмісних препаратів у поєднанні з **Кліп Флоу**.

### **Вказівки по застосуванню та зберіганню:**

Зберігати при температурі 4°C - 23°C. Після використання порції матеріалу шприци негайно закрити, щоби уникнути дії світла та зумовленій цим полімеризації.

Не застосовувати матеріал після закінчення терміну придатності.

### **Утилізація :**

Матеріал потрібно утилізувати відповідно до місцевих офіційних приписів.

### **Обов'язкове сповіщення :**

Про всі серйозні побічні випадки, такі як смерть, серйозне погіршення стану здоров'я пацієнта, користувача або інших осіб протягом довгого або короткого проміжку часу, а також про серйозну загрозу суспільному здоров'ю, які виникли або могли трапитись у зв'язку з використанням **Кліп Флоу** необхідно повідомляти в компанію VOCO GmbH та в компетентні органи

Останній перегляд : 02-2024



#### **Воко ГмБХ**

27472 Антон-  
Флеттнер-штр. 1-3,  
Куксхафен, Німеччина

#### **Voco GmbH**

27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,  
Cuxhaven, Germany

#### **Уповноважений представник в Україні:**

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович  
вул. Мишуги ¼, кв. 19  
м. Київ, 02141, Україна  
e-mail: m.litvinenko@voco.com  
+380503311092



**UA.TR.120**