



VOCO Профлуорид Варніш (VOCO Profluorid Varnish)

Фторидовмісний лак для лікування гіперчутливості зубів

Інструкція із застосування



VOCO Профлуорид Варніш – це фторвмісний лак для десенсibiliзації зубів при обробці поверхонь емалі та дентину.

VOCO Профлуорид Варніш зчіплюється з вологими поверхнями і толерантний до залишків вологи та слини. **VOCO Профлуорид Варніш** є етаноловою суспензією з каніфолі зі штучним ароматом і солодкуватим присмаком ксилітолу.

1 мл **VOCO Профлуорид Варніш** містить 50 мг фториду натрію, еквівалентних 22,6 мг фториду.

Показання:

VOCO Профлуорид Варніш призначений для:

1. Лікування гіперчутливих зубів.
2. Герметизації дентинних каналців при препаруванні порожнин або чутливих поверхонь коренів.

Спосіб застосування:

Рекомендована доза

- Лікування пацієнтів у молочному прикусі при бл. 0,25 мл **VOCO Профлуорид Варніш**
- Лікування пацієнтів у змінному або постійному прикусі при бл. 0,40 мл **VOCO Профлуорид Варніш**

Тонкою плівкою нанести **VOCO Профлуорид Варніш** на тверді тканини зуба. Товста плівка легко усувається і не виявляє терапевтичного ефекту. На підставі досвіду для повного прикусу необхідна кількість препарату становить від 0,25 до 0,40 мл.

Застосування:

1. Ліковані ділянки ретельно очистити від зубного каменю.
2. Для забезпечення кращого результату повністю усунути надмір вологи/слини з поверхні, що підлягає лікуванню.
3. Нанести рівномірно **VOCO Профлуорид Варніш**, так щоби поверхня була повністю покрита тонкою плівкою.
4. Зволожити оброблювану ділянку (легке промивання або природне потрапляння слини), щоби забезпечити твердіння **VOCO Профлуорид Варніш**.
5. Проінструктувати пацієнтів про те, що протягом 4 годин після проведеної обробки необхідно виключити вживання твердої їжі, алкоголю, чистку зубів, використання зубної нитки.

Вказівки/Запобіжні заходи:

VOCO Профлуорид Варніш містить природну смолу (каніфоль).

При підвищеній чутливості (алергії) на ці компоненти **VOCO Профлуорид Варніш** потрібно відмовитись від його застосування.

Каніфоль може негативно впливати на полімеризацію та адгезію композитів.

При використанні циліндричної ампули завжди застосовувати тільки передбачені для цього аплікаційні канюлі з тупим кінцем (довжина 32 мм, діаметр 0,9 мм). **VOCO Профлуорид Варніш** у циліндричній ампулі призначений для багаторазового використання. Після аплікації зняти канюлю і зберігати циліндричну ампулу без канюлі. (Ампула щільно закрита гумовою перегородкою). Перед наступним застосуванням встановити нову канюлю.

Відповідно до мети застосування **VOCO Профлуорид Варніш** має липку консистенцію. При використанні залишки матеріалу на гвинтовій різьбі туби можуть викликати прилипання ковпачка. При потребі забруднення очистити серветкою, зволоженою у спирті.

Не застосовувати **VOCO Профлуорид Варніш** у пацієнтів із виразковим гінгівітом або запаленнями слизової оболонки порожнини рота. **VOCO Профлуорид Варніш** не призначений для системного лікування. У рідких випадках повідомлялось про одематозні набряки, зокрема після застосування на більших поверхнях. При використанні співставних препаратів повідомлялось про вкрай рідкісні випадки задишки у дітей, хворих на астму.

У пацієнтів з чутливою травною системою після тривалого лікування може виникати нудота.

При підвищеній чутливості до **VOCO Профлуорид Варніш**: усунути лак м'якою зубною щіткою і зубною ниткою, після цього сполоснути теплою водою. У день проведення лікування не використовувати жодних інших фторвмісних препаратів.

Після проведення обробки лаком **VOCO Профлуорид Варніш** на кілька днів припинити прийом фторвмісних таблеток.

Лак не ковтати.

Зберігання:

Зберігати при температурі 4°C - 23°C. Не застосовувати препарат після завершення терміну придатності.

Наші препарати розроблені для використання у стоматології. Оскільки йдеться про застосування препаратів, що постачаються нами, наші усні та/або письмові вказівки, а також наша консультація, є абсолютно чесними і ні до чого не зобов'язують. Наші вказівки і /або консультація не звільняють Вас від перевірки препаратів, що постачаються нами, на їх придатність до використання у відповідних цілях. Оскільки застосування наших препаратів проводиться без нашого контролю, відповідальність за це лягає виключно на Вас. Зрозуміло, ми гарантуємо, що якість наших препаратів відповідає чинним нормам, а доставка та умови торгівлі – встановленим стандартам.



Воко ГмБХ
27472 Антон-
Флеттнер-ст. 1-3,
Куксхафен, Німеччина
Voco GmbH
27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,
Cuxhaven, Germany

Уповноважений представник в Україні:
ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович
02141 м. Київ, Україна,
вул. Мишуги ¼, кв. 19
m.litvinenko@voco.com
+380503311092



UA.TR.120