



Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ (Structur 2 SC/ Structur 2 QM)

Інструкція із застосування



Структур 2 СЦ / Структур 2 КМ – це система паста–паста холодної полімеризації для виготовлення тимчасових коронок, мостоподібних конструкцій, вкладок і накладок. **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ** складається з базисної та каталізаторної паст. **Структур 2 СЦ** випускається 7 кольорів: А1, А2, А3, В1, В3, С2 та ВL. **Структур 2 КМ** постачається в кольоровій гамі А1, А2 та А3.

Застосування:

Структур 2 СЦ в картриджах:

Помістити картриджі із **Структур 2 СЦ** у пістолет для змішування **VOCO (тип 2)** або у відповідний інший. Перед першим застосуванням можуть виявлятися технічно зумовлені незначні відмінності у наповненні обидвох камер картриджів. Зняти ковпачок і витискати матеріал до тих пір, поки з обох отворів не виходитиме однакова кількість матеріалу. Надіти канюлю для змішування тип 6 і зафіксувати її поворотом на 90°, натисканням на спуск витиснути матеріал, який при цьому змішується у правильній пропорції. Після використання канюлю залишити на картриджі. Перед наступним застосуванням замінити на нову канюлю. Під час зміни канюлі перевірити отвори картриджів на вільне надходження матеріалу.

Структур 2 КМ у шприцах Квік Мікс:

Зняти захисну капу зі шприца поворотом проти годинникової стрілки. Встановити канюлю для змішування тип 10. Пази шприца і канюлі для змішування повинні співпадати. Зафіксувати канюлю поворотом на 90° за годинниковою стрілкою. При витисканні матеріал автоматично змішується у канюлі в правильній пропорції і його можна безпосередньо аплікувати.

Вказівки з обробки:

Згладити наявні нерівності відпрепарованої кукси, не використовуючи при цьому евгенолвмісні цементи. У разі, якщо не будуть використовуватися попередньо виготовлені зубні ковпачки або ін., зняти відбиток. Відбиток підготувати шляхом вирівнювання нерівностей і вирізання канавок для стоків. При очікуваній незначній товщині стінок тимчасової реставрації відбиток розширити, усуваючи зокрема перегородки в міжзубних проміжках. На завершення відбиток очистити і висушити повітрям.

Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ аплікувати безпосередньо у відбиток. Не наповнювати з надлишком.

Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ приблизно через 1-1,5 хв після початку змішування (через 0,5-1 хв після внесення у порожнину рота) набуває еластичної консистенції.

Тимчасову реставрацію можна вилучати з порожнини рота через 1,5 хв, однак відсутність проблем при вилученні можлива тільки в еластичній фазі.

Надлишки матеріалу є засобом додаткового контролю за процесом зв'язування. Час зв'язування матеріалу, що залишився в канюлі, не порівнюється з часом зв'язування у порожнині рота.

При температурі у приміщенні 23°C і вологості повітря 50% тривалість етапів обробки наступна:

Час	Хронометраж
Внесення у порожнину рота	30 с
Зв'язування у порожнині рота	1 хв
Вилучення	1,5 хв
Повне зв'язування (3 хв)	4,5 хв
Подальша обробка	

З огляду на різну температуру в приміщенні можливі відхилення.
Приблизно через 2 - 3 хв тимчасову реставрацію вилучити з відбитка і висушити (можливе застосування, напр., етилового спирту). Це усуває інгібований киснем тонкий шар, що зазвичай утворюється і полегшує подальшу обробку. Поверхня тимчасової реставрації повинна виглядати матово-шовковистою. На завершення надлишки і шорсткі місця на ділянці ясен ретельно зішліфувати. Готову тимчасову реставрацію зафіксувати за допомогою тимчасового цементу **Провікол / Ц / КМ (Provicol / C / QM)**, що не містить евгенолу.

Вказівки/запобіжні заходи:

- **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ**, що містить BIS-GMA, аміни, терпени, бензоїлпероксид, ВНТ, не застосовувати при алергії на окремі складові компоненти
- Відпрепаровані кукси для захисту від підвищеної чутливості перед фіксацією тимчасової реставрації можна ізолювати (фторлаком, напр., **Біфлуорід 12 (Bifluorid 12)**, лаком для кукс та ін.)
- Щоби виключити злами і ушкодження, тимчасова реставрація не повинна зазнавати значного навантаження (ділянка молярів)
- Пломби і кукси, виготовлені з матеріалів на композитній основі, ретельно ізолювати, щоби виключити їх усунення разом із тимчасовою реставрацією (напр., гліцерином)
- Незадовільна гігієна або інтенсивне використання ополіскувачів для порожнини рота може спричинити зміну кольору
- Триваліший час зв'язування невикористаних залишків (у канюлі для змішування) не може бути орієнтиром для визначення моменту вилучення тимчасової реставрації
- Обробку тимчасової реставрації починати після її повного затвердіння (приблизно через 4,5 хв після початку змішування)
- Лагодження тимчасової реставрації: якщо, незважаючи на високу міцність **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ**, стався злам конструкції, рекомендується дотримуватися наступних вказівок:
- Тимчасову реставрацію висушити повітрям і просто заповнити **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ**.
- При зламі відразу після виготовлення: місця зламу склеїти за допомогою свіжоприготованого **Структур 2 СЦ/ Структур 2 КМ**.
- Лагодження реставрацій, використаних пацієнтом:
- Склеювані поверхні зашліфувати фрезею. На місця зламу нанести адгезивну рідину (**Солобонд Плюс або Солобонд М**) і полімеризувати згідно з інструкцією. Нанести на підготовані поверхні флоу-матеріал (напр., **Гранд Флоу** або **Адміра Флоу**), місця зламу з'єднати і полімеризувати відповідно до інструкції із застосування.

Вказівки із зберігання:

Зберігати при температурі 4 – 23°C. **Картриджі зберігати у захищеному від світла місці, у закритій упаковці у висувній шухляді тощо.**

Форми випуску:

Структур 2 СЦ

Інтросет 75 г картриджі А3, пістолет для змішування тип 2, канюлі для змішування тип 6
Арт. № 1478

Упаковка 75 г картридж, канюлі для змішування тип 6

Арт. № 1479	A1	Арт. № 1483	B3
Арт. № 1480	A2	Арт. № 1485	BL
Арт. № 1481	A3	Арт. № 1486	C2
Арт. № 1482	B1		

Велика упаковка колір А3, 5 x 75 г картриджі, канюлі для змішування тип 6
Арт. № 1491

Велика упаковка колір А2, 5 x 75 г картриджі, канюлі для змішування тип 6
Арт. № 1492

Канюлі для змішування **Структур 2 СЦ**

50 штук, тип 6

Арт. № 2185

Структур 2 КМ

Упаковка **шприци Квік Мікс** 8 г, канюлі для змішування
тип 10

Арт. № 1309 А1 Арт. № 1311 А3

Арт. № 1310 А2

Канюлі для змішування **Структур 2 КМ**

50 штук, тип 10

Арт. № 2189

Наші препарати розроблені для застосування у стоматології. Усні та/або письмові вказівки, а також наші поради, засновані на докладному вивченні матеріалу, не зобов'язують Вас відмовитися від використання матеріалів, що випускаються нами, відповідно до Вашої спеціальності і на Ваш розсуд. Однак застосування наших матеріалів без нашого контролю знаходиться виключно у сфері Вашої власної відповідальності. Звичайно ми гарантуємо відповідність якості наших матеріалів чинним нормам, доставку та умови торгівлі - прийнятим стандартам.



VOCO GmbH

ВОКО гмбХ

27472 Антон-Флеттнер-ст.

1-3, Куксхафен, Німеччина

27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,

Cuxhaven, Germany

Уповноважений представник в Україні:

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович

02141 м. Київ, Україна,

вул. Мишуги ¼, кв. 19

m.litvinenko@voco.com

+380503311092



UA.TR.120