



Твінкі Стар (Twinky Star)

Інструкція із застосування

Відповідає стандартам
EN 23107/ ISO 3107

Дозволений для застосування на території України
МОЗ



Твінкі Стар – різнокольоровий рентгеноконтрастний компомерний пломбувальний матеріал з ефектом блискіток для порожнин у тимчасових зубах. Забезпечує просте і швидке пломбування, а також поєднує характерне для склоіономерних цементів виділення фторидів із фізичною стійкістю композитів.

Твінкі Стар полімеризують галогеновим (синім) світлом і застосовують у поєднанні з дентино-емалевим бондом (напр., **Футурабонд**).

Показання:

- Пломбування тимчасових зубів.

Обробка:

Підготовка/вибір кольору:

Зуби, що підлягають пломбуванню, очистити пастою, що не містить фтору (напр., **Клінт**). Наявна шкала кольорів дозволяє вибрати один із 7 кольорів. Звернути увагу на надійну ізоляцію робочого поля.

Препарування порожнини:

Препарування необхідно проводити відповідно до принципів адгезивної техніки із застосуванням мінімально інвазійного методу, що забезпечує щадну дію на здорові тканини зуба. Необхідно дотримуватись особливих принципів препарування порожнин тимчасових зубів!

Очистка:

- Усунути з порожнини зуба всі залишки струменем води
- Виключити контакт з кров'ю або слиною
- Надмір вологи усунути слабким струменем повітря. Не пересушувати дентину!
Поверхня дентину повинна бути вологою, але не мокрою.

Захист пульпи:

На місця порожнини, що межує з пульпою зуба, слід аплікувати прокладку на основі гідроксиду кальцію (**Кальцікур, Кальцімол**).

Адгезивна система:

Для отримання оптимального зчеплення використовувати звичайний дентино-емалевий бонд із врахуванням рекомендацій виробника (напр., **Футурабонд**, самопротравний дентино-емалевий бонд).

Аплікація Твінкі Стар:

При товщині пломби понад 2 мм матеріал аплікувати та полімеризувати пошарово. Кожний шар полімеризувати біля 40 с галогеновою лампою (**Полофіл Люкс**).

Використовувати прозорі матриці, ковпачки, світлопровідні клини. Звернути увагу на щільне крайове прилягання. Робочу частину лампи розташовувати якомога ближче до поверхні пломби. Якщо віддаль становить понад 5 мм, то слід враховувати зменшення глибини твердіння, тобто порушення полімеризації. Неповна полімеризація може спричинити зміну кольору пломби та подразнення пульпи.

Обробку та полірування пломби можна проводити безпосередньо після усунення матриць і ковпачків (напр., алмазними фінірами, шліфувальними дисками). На завершення межі пломба/емаль, а краще увесь зуб повністю покрити фторвмісним препаратом **Біфлуорид 12**.

Вказівки/запобіжні заходи:

Твінкі Стар містить BIS-GMA, диуретандиметилакрилат, TEGDMA, BHT.

- Якщо неможлива надійна ізоляція або застосування вищевказаної техніки пломбування, а також при виявленні алергії на окремі компоненти, слід відмовитись від застосування **Твінкі Стар**.

Твінкі Стар протипоказаний для прямого або непрямого покриття пульпи зуба, а також оклюзійно навантажених постійних пломб у постійних зубах.

- Препарати, що містять евгенол або гвоздичну олію, порушують полімеризацію композитних пломб. Тому слід виключити застосування цинкооксидевгенольних цементів або інших евгенолвмісних препаратів у поєднанні з композитами.

- **Твінкі Стар** – пломбувальний матеріал на компомерній основі зі спеціальним колірним ефектом. Цей виблискуючий колірний ефект досягається не в результаті включення металів, а через додавання блискіток (нерозчинна мінеральна речовина).

Всі барвники відповідають стандартам для продуктів харчування і косметичних засобів і нетоксичні. Після полімеризації надійно фіксуються у композиті. Незначний їх вміст і нерозчинність гарантують безпечне застосування **Твінкі Стар**.

Зберігання:

Зберігати у щільно закритому вигляді (15 - 25° С).

Форма поставки:

Комплект 40 x 0,25 г капсули різних кольорів
Шкала кольорів Арт. № 1680

Додаткові упаковки 25 x 0.25 г капсули:

Арт. № 1681	золотий	Арт. № 1685	зелений	Арт. №
1682	срібний	Арт. № 1686	оранжевий	
Арт. № 1683	синій	Арт. № 1687	лимонний	
Арт. № 1684	рожевий			

Шкала кольорів **Твінкі Стар** Арт. № 1689
Ред.: 02-2024

Наші препарати розроблені для застосування у стоматології. Усні та/або письмові вказівки, а також наші поради, засновані на докладному вивченні матеріалу, не зобов'язують Вас відмовитися від використання матеріалів, що випускаються нами, відповідно до Вашої спеціальності і на Ваш розсуд. Однак застосування наших матеріалів без нашого контролю знаходиться виключно у сфері Вашої власної відповідальності. Звичайно ми гарантуємо відповідність якості наших матеріалів чинним нормам, доставку та умови торгівлі - прийнятим стандартам.

Voco GmbH

27472 Антон-Флеттнер-ст. 1-3,
Куксхафен, Німеччина
27472, Anton-Flettner-Str. 1-3,
Cuxhaven, Germany

Уповноважений представник в Україні:

ФОП Литвиненко Мирослав Миколайович
02141 м. Київ, Україна,
вул. Мишуги ¼, кв. 19
m.litvinenko@voco.com
+380503311092



UA.TR.120